

NEU! Protecto CaF₂ Nano
SINGLE DOSE
Für die hygienische Applikation
Ab sofort lieferbar!

Protecto® CaF₂ Nano ONE-STEP-SEAL

Silikonbasierter Einkomponenten-Schuttlack mit Nano-Fluorapatit und Nano-Calciumfluorid

Produktbeschreibung

Protecto® CaF₂ Nano ist ein Nano-Fluorapatit und Nano-Calciumfluorid enthaltender säureangriffsmildernder Einkomponenten-Schuttlack auf Silikon-Basis zur Versiegelung von Zähnen. Nano-Fluorapatit-Teilchen sind dafür bekannt, die Remineralisierung von Zahnschmelze zu unterstützen.

Protecto® CaF₂ Nano haftet ohne Schmelzätzen und bildet einen Schutzfilm. Die Verarbeitung ist einfach und zeitsparend. Der Schutzfilm kann bei Bedarf beliebig erneuert oder ergänzt werden.

Protecto® CaF₂ Nano enthält **2000 ppm (0,2 %) Fluorid**.

Indikationen/Zweckbestimmung

- Versiegelung von Zähnen bei erschwerter Zahnreinigung durch Multibandbehandlung
- Temporäre Versiegelung von Randspalten bei Zahnersatz
- Versiegelung von Zähnen nach Bleaching-Behandlungen (Schutz vor Verfärbung und Remineralisierung)
- Schutz freiliegender Zahnhälse
- Schutz von Milchzähnen
- Schutz nach Zahnsteinentfernung und nach professioneller Zahnreinigung

Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Eine Abformung der mit Protecto® CaF₂ Nano behandelten Zähne mit Vinylsilikon ist frühestens 4 Wochen nach der Behandlung möglich.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender

Die Anwendung des Medizinproduktes erfolgt durch den professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten Anwender.

Gebrauchsanweisung

Applikation von Protecto® CaF₂ Nano

Die zu behandelnden kariessicheren Zähne werden gründlich mit ölfreier Paste gereinigt, poliert und im wasser- und ölfreien Luftstrom getrocknet.

Die Flasche mit Protecto® CaF₂ Nano vor Gebrauch kräftig schütteln. Die Kugel in der Flasche muss beim Schütteln deutlich hörbar sein.

Anschließend wird Protecto® CaF₂ Nano 2 bis 3 mal gleichmäßig und flächendeckend dünn auf die zu versiegelnden Flächen aufgetragen. Darauf achten, dass die Schleimhaut nicht mit dem Protecto® CaF₂ Nano in Berührung kommt.

Protecto® CaF₂ Nano ca. **1 Minute** trocknen lassen oder leicht im ölfreien Luftstrom trocknen.

Flasche sofort nach Gebrauch wieder verschließen.

Wichtige Hinweise

- In den ersten 2 Stunden nach der Anwendung von Protecto® CaF₂ Nano nichts essen und die Zähne nicht putzen.
- Sollen Zähne während einer kieferorthopädischen Multibandbehandlung durch Protecto® CaF₂ Nano geschützt werden, erfolgt das Einsetzen der Brackets **vor** der Behandlung mit Protecto® CaF₂ Nano.
- Der intensive Geruch von Protecto® CaF₂ Nano verflüchtigt sich schnell innerhalb der Trocknungszeit von 1 Minute.
- Protecto® CaF₂ Nano enthält Ethylacetat. Ethylacetat ist leicht entflammbar und daher von Zündquellen fernzuhalten. Der Ethylacetat Dampf sollte nicht eingeatmet werden. Bei Kontakt mit den Augen sind diese mit viel Wasser zu spülen und ggf. ist ein Arzt aufzusuchen. Bei versehentlichem Hautkontakt sind die Kontaktstellen sofort gründlich mit Seife und Wasser zu waschen.
- Protecto® CaF₂ Nano – Flasche: Eine Kontamination des Flascheninhalts mit verunreinigten Einmalpinseln muss vermieden werden.

- Protecto® CaF₂ Nano – SingleDose ist aus hygienischen Gründen nur für die einmalige Anwendung an einem Patienten vorgesehen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Lagerung

Nicht über 25 °C (77 °F) lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden!

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Garantie

SanaPro Dental GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. SanaPro Dental GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von S& SanaPro Dental GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des SanaPro Dental GmbH -Produktes.

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für SanaPro Dental GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

Handelsform:

Art-Nr. 7200-N100 Protecto® CaF₂ Nano mit Fluorid 4 ml Flasche, Mischpaletten, Mircobrushes

Art-Nr. 7200-S100 Protecto® CaF₂ Nano SINGLE DOSE 9 x 0,5 ml Flaschen (4,5 ml) Mischpaletten, Mircobushes

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!



Manufacturer: SanaPro Dental GmbH, Stresemannstr. 46, 27570 Bremerhaven, Germany

Vertrieb: **BonaDent GmbH**, Dental-Produkte Postfach 560226, D-60407 Frankfurt,

Tel: 069-586 073 90, Fax: 069-586 073 931

Internet: www.bonadent.de, Mail: bonadent@t-online.de



Protecto CaF₂ Nano ist eine registriertes Warenzeichen der Firma BonaDent GmbH.



Protecto® CaF₂ Nano-1-2024 .doc /Stand 10.01.2024