

PROTECTO® ONE-STEP-SEAL

Mit Fluorid

Silikonbasierter fluoridhaltiger Einkomponenten - Schutzlack zur Versiegelung von Zähnen

Produktbeschreibung

Protecto® F ist ein fluoridhaltiger Einkomponenten-Schutzlack zur Versiegelung von Zähnen, insbesondere zur Versiegelung von Zähnen, dessen Schmelz durch die Multibandbehandlung besonderer Gefährdung und Belastung durch erschwerte Zahnreinigung ausgesetzt ist.

Protecto® F haftet ohne Schmelzätzen und bildet einen Schutzfilm. Die Verarbeitung ist einfach und zeitsparend. Der Schutzfilm kann bei Bedarf beliebig erneuert oder ergänzt werden.

Protecto® F enthält 500 ppm (0,05 %) Fluorid.

Indikationen/Zweckbestimmung

- Versiegelung von Zähnen bei erschwerter Zahnreinigung durch Multibandbehandlung
- Schutz vor Verfärbung nach Bleaching
- Schutz freiliegender Zahnhälse

Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Eine Abformung der mit Protecto® F behandelten Zähne mit Vinylsilikon ist frühestens 4 Wochen nach der Behandlung möglich.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender

Die Anwendung des Medizinproduktes erfolgt durch den professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten Anwender.

Gebrauchsanweisung

Applikation von Protecto® F

Die zu behandelnden kariesfreien Zähne werden gründlich mit ölfreier Paste gereinigt, poliert und im wasser- und ölfreien Luftstrom getrocknet.

Anschließend wird Protecto® F 2- bis 3-mal gleichmäßig und flächendeckend dünn auf die zu versiegelnden Flächen aufgetragen. Darauf achten, dass die Schleimhaut nicht mit dem Protecto® F in Berührung kommt.

Protecto® F ca. **1 Minute** trocknen lassen oder leicht im ölfreien Luftstrom trocknen.

Flasche sofort nach Gebrauch wieder verschließen.

Wichtige Hinweise

- In den ersten 2 Stunden nach der Anwendung von Protecto® F nichts essen und die Zähne nicht putzen.
- Sollen Zähne während einer kieferorthopädischen Multibandbehandlung durch Protecto® F geschützt werden, erfolgt das Einsetzen der Brackets **vor** der Behandlung mit Protecto® F.
- Der intensive Geruch von Protecto® F verflüchtigt sich schnell innerhalb der Trocknungszeit von 1 Minute.
- Protecto® F enthält Ethylacetat. Ethylacetat ist leicht entflammbar und daher von Zündquellen fernzuhalten. Der Ethylacetat Dampf sollte nicht eingeatmet werden. Bei Kontakt mit den Augen sind diese mit viel Wasser zu spülen und ggf. ist ein Arzt aufzusuchen. Bei versehentlichem Hautkontakt sind die Kontaktstellen sofort gründlich mit Seife und Wasser zu waschen.
- Eine Kontamination des Flascheninhalts mit verunreinigten Einmalpinseln muss vermieden werden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Lagerung

In der Original-Siegelverpackung lagern. Nicht über 25 °C (77 °F) lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden!

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Garantie

SanaPro Dental GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellern ist. SanaPro Dental GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von SanaPro Dental GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des Produktes.

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für SanaPro Dental GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.



Manufacturer: SanaPro Dental GmbH, Stresemannstr. 46, 27570 Bremerhaven, Germany

Vertrieb: **BonaDent GmbH**, Dental-Produkte Postfach 560226, D-60407 Frankfurt,

Tel: 069-586 073 90, Fax: 069-586 073 931

Internet: www.bonadent.de, Mail: bonadent@t-online.de

Protecto® F ist ein registriertes Warenzeichen der Firma BonaDent GmbH.



Protecto F-1-2024 / Stand: 09.01.2024